

Gebruikershandleiding voor de elektrische momentsleutel voor implantaten

1 Productintroductie

De elektrische momentsleutel voor implantaten is een draadloze, veilige en efficiënt apparaat voor professionele tandheelkundige ingrepen. Het kan gebruikt voor het plaatsen en verwijderen van tandheelkundige implantaten, implantaatabutments, implantaatgenezingsmoeren enz. Belangrijkste kenmerken:

- 1) Kleurrijk TFT-scherm
- 2) Het koppel en de snelheid zijn nauwkeurig, stabiel, veilig en efficiënt
- 3) De hoekstuk kan vrij draaien
- 4) De hoekstuk kan bij hoge temperatuur en druk worden gesteriliseerd in een autoclaaf


2 Productspecificaties

Afmetingen: <124 mm (max.) • 215 mm Gewicht: 155 g


3 Belangrijkste technische parameters

- 1) Batterij: 3,7 V/1400 mAh
- 2) Oplader: DC 5,0 V
- 3) Snelheid: 10~50 tpm
- 4) Koppel: 10~50 N·cm

4 Opbouw

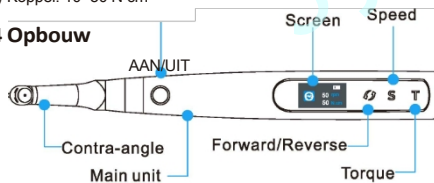

5 Gebruikersinterface

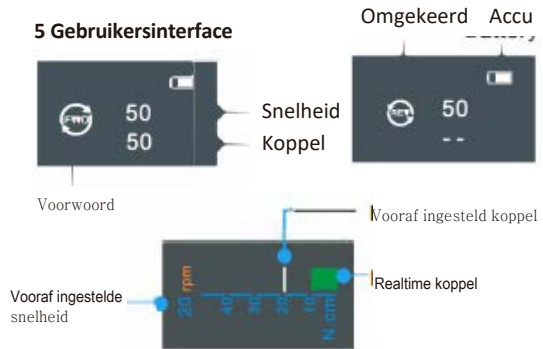

6 Gebruik van het product

Het scherm geeft automatisch de laatst gebruikte parameters weergeven dankzij de geheugenfunctie. Houd in de stand-bymodus de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt voordat u het apparaat uitschakelt, anders schakelt het apparaat automatisch uit na 3 minuten inactiviteit.

- 1) Druk op de toets "J/I" om te schakelen tussen voorwaartse en achterwaartse rotatie
- 2) Druk op de "S"-toets om de snelheid aan te passen
Snelheidsstanden: 1 rpm, 20 rpm, 30 rpm, 40 rpm, 50 rpm
- 3) Druk op de toets „T“ om het koppel in te stellen
Koppelstanden: 10 N·cm, 20 N·cm, 30 N·cm, 40 N·cm, 50 N·cm

7 Opladen

Wanneer het batterijpictogram rood wordt weergegeven, betekent dit dat de batterij tijdig moet worden opgeladen; gelieve het apparaat dan niet verder te gebruiken. Onvoldoende batterijvermogen kan ertoe leiden dat het apparaat niet opstart, of tijdens het gebruik automatisch stopt of wordt uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en de oplaadkabel in de aansluiting aan de achterzijde is gestoken en is aangesloten op de stroomvoorziening, licht het scherm op en knippert het batterij-LED-lampje om aan te geven dat het opladen is gestart.