



25 minuten)→de derde afvoer (TE.3)→in evenwicht brengen tot een druk van 0,00 bar (LED-display „END”)→de deur openen (sterilisatie voltooid).

5.3 Knop ‘Droog’-programma:

Let op: Voor het droogprogramma moet de deur open staan.

Druk op de programmatoets „Drogen“, waarna het lampje begint te knipperen. Druk vervolgens op de toets „START/STOP“ om het droogprogramma van 19 minuten te starten terwijl het lampje knippert.

5.4 Knop „Afvoer“

Wanneer de sterilisator niet in werking was, maar er binnenin hoge druk werd vastgesteld. In dat geval moet de knop ‘Afvoer’ worden gebruikt.

Werking: 1. Druk op de knop ‘Afvoer’. 2. Het lampje verandert van ‘UIT’ naar ‘AAN’. 3. Het lampje gaat weer ‘AAN’. 4. De deur kan nu worden geopend.

5.5 "Abnormaal afsluiten"

De functie „Abnormally Exit“ kan worden gebruikt wanneer het programma loopt, maar u het wilt stoppen.

Werkwijze: 1. Houd de knop ‘START/STOP’ 3 seconden ingedrukt. 2. In het temperatuurvenster knippert ‘E00’. De sterilisator begint met ontluchten. 3. Druk nogmaals op ‘START/STOP’ zodra het drukvenster 0,0 bar aangeeft en het geluid ‘KA’ klinkt wanneer de vergrendeling wordt ontgrendeld. 4. De deur kan worden geopend totdat in het temperatuurvenster ‘Ld’ knippert.

6. Waarschuwing:

- 6.1 Open de deur van de sterilisator niet tijdens het gebruik en terwijl het apparaat in werking is!
- 6.2 Bij elk gebruik is minimaal 1000 ml gedestilleerd water nodig.
- 6.3 In geval van nood dient u de stroomtoevoer onmiddellijk te onderbreken.
- 6.4 Als er lekkage uit de deur optreedt, stel dan de afdichting op het juiste niveau af.

7. Alarmcode en probleemoplossing:

Code E01: De temperatuursensor (in de kamer) is defect!

Oplossing: de weerstandswaarde (Ω) van de temperatuursensor moet $\approx 1000 + (\text{omgevingstemperatuur in } ^\circ\text{C} \times 3,8)$ zijn.

1. Als het meetresultaat GOED is, controleer dan of er een slecht contactpunt is tussen de sensor en de besturingskaart
2. Als het meetresultaat SLECHT is, vervang dan de temperatuursensor.

Code E02: De temperatuursensor (verwarmingsspiraal) is defect!

Meting: de weerstandswaarde van de temperatuursensor (Ω) $\approx 1000 + (\text{omgevingstemperatuur in } ^\circ\text{C} \times 3,8)$.

1. Als het meetresultaat GOED is, controleer dan of er een slecht contactpunt is tussen de sensor en de besturingskaart
2. Als het meetresultaat SLECHT is, vervang dan de temperatuursensor.

Foutcode E03: Te hoge temperatuur in de kamer!

Vervang de temperatuursensor (in de kamer).

Foutcode E04: Sterilisatie mislukt!

1. Controleer of de deurafdichting goed aansluit; er kan sprake zijn van lekkage. 2. Vervang de deurafdichting.

Foutcode E06: De deur werd tijdens de sterilisatie geopend!

De deurschakelaar had slecht contact of het elektrische slot was beschadigd.

Foutcode E07: Lekkage bij de deurrubber of de magneetventielen lekten!

1. Reinig of vervang de afdichting. 2. Reinig of vervang de kleppen.

E11-code: Het elektrische slot is defect!

E13-code: Te hoge temperatuur in de kamer!

Controleer of er voldoende water in de kamer zit.

Stoomsterilisator JC-serie (klasse N)



Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor het gebruik van een Getidy-product! Lees deze instructies volledig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Specificaties

1.1 Afmetingen van de kamer (roestvrij staal SU304):

16 liter (Φ230 mm x 360 mm) 18 liter (Φ250 mm x 355 mm)
23 liter (Φ250 mm x 450 mm)

1.2 Afmetingen machine:

16 liter (B: 385 mm H: 365 mm D: 475 mm)
18 liter (B: 385 mm H: 365 mm D: 475 mm)
23 liter (B: 385 mm H: 365 mm D: 575 mm)

1.3 Vermogen: AC 110/1200 W/11 A; AC 220/1400 W/6,3 A

1.4 Sterilisatietemperatuur/sterilisatiedruk:

121 °C - 1,2 bar (0,012 MPa) 134 °C - 2,2 bar (0,022 MPa)

1.5 Sterilisatietijd: 25 min (121 °C) 6 min (134 °C)

1.6 Accessoires:

Ladenrek * 1 stuk, laden * 3 stuks Ladehouder*1 stuk
Zekering*2 stuks Afvoerslang * 1 st. Maatbeker * 1 st.

1.7 Vergrendelingssysteem:

Dubbele vergrendeling met elektrische en mechanische vergrendeling

1.8 Voorkom droogverbranding


1.9 Veiligheid:

Oververhittingsbeveiliging Veiligheidsklep

1.10 Gewicht van de machine:


16 liter (bruto: 28,8 kg, netto: 27,3 kg)
18 liter (bruto: 29,9 kg, netto: 28,4 kg)
23 liter (bruto: 33,8 kg, netto: 32,3 kg)

2. Beschrijving van de onderdelen

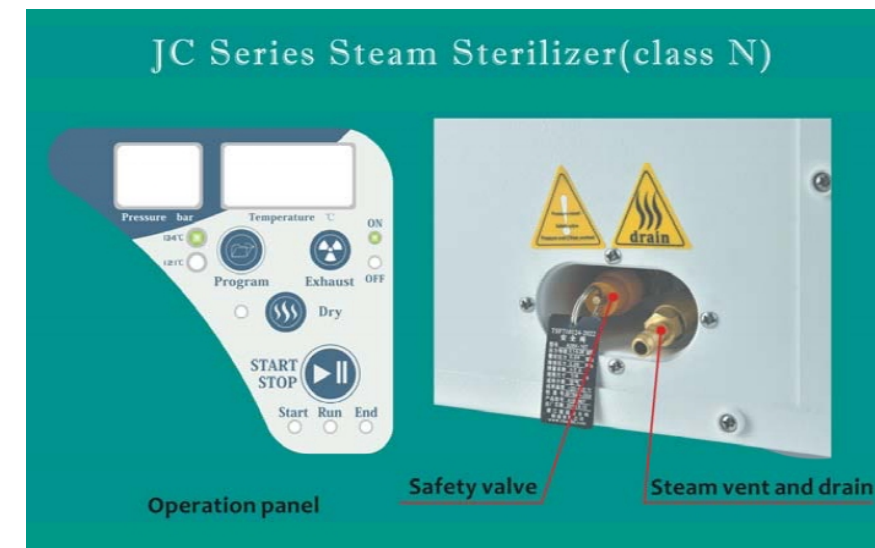

3. Installatie

De machine moet horizontaal op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Verwijder vervolgens de bodemplaat en vul de kamer langzaam met water. Zorg ervoor dat de verwarmingselementen volledig onder water staan.

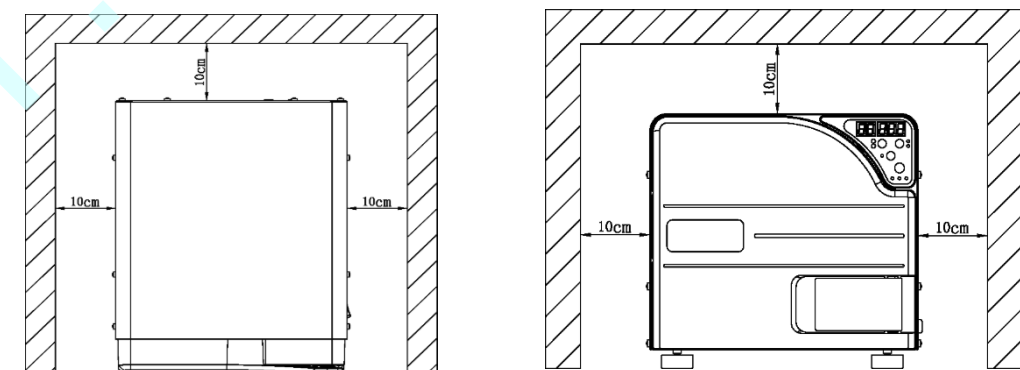

Houd de machine op een afstand van 10 cm van de muren.

4. Bedieningsstappen:

- 4.1. Open de deur; op het LED-display knippert "Ld".
- 4.2. Giet 1000 ml water met de maatbeker in de kamer.
- 4.3. Plaats de instrumenten op de bakjes en zet deze vervolgens in de kamer.
- 4.4. "Ld" stopt met knipperen zodra de deur is gesloten.
- 4.5. Druk op de knop 'PROGRAM' om het sterilisatieprogramma van 134 °C of 121 °C te selecteren.
- 4.6. Druk op de knop 'START/STOP' om te starten.

5. Sterilisatieproces:

5.1 Knop „134 °C-programma“:

Opwarmen tot een druk van 0,70 bar (HE.1) → eerste ontluchting (TE.1) → opwarmen tot een druk van 1,70 bar (HE.2) → tweede ontluchting (TE.2) → opwarmen tot een druk van 2,20 bar (HE.3) → start 135 °C Sterilisatie (duurt 6 minuten) → derde ontluchting (TE.3) → druk terugbrengen tot 0,00 bar (LED-display „END“) → de deur openen (sterilisatie voltooid).

5.2 Knop „121 °C-programma“:

Opwarmen tot druk 0,70 bar (HE.1) → de eerste ontluchting (TE.1) → Opwarmen tot druk 1,00 bar (HE.2) → de tweede ontluchting (TE.2) → opwarmen tot druk 1,20 bar (HE.3) → start 122 °C-sterilisatie (duurt