

TPC



#PC-2530 - Mobile-Vac draagbare afzuigunit

GEBRUIKSAANWIJZING

Disclaimer

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe PC-2530 Mobile-Vac draagbare vacuümunit. Om optimaal van uw apparaat te profiteren, verzoeken wij u deze instructies te lezen voordat u aanpassingen uitvoert, en ze te bewaren voor toekomstig gebruik. We hopen dat u vele jaren plezier zult beleven aan uw nieuwe afzuigstelsel.

Voor verdere hulp kunt u bellen naar: 800-560-8222 of onze website bezoeken: www.tpcdental.com

Aankoopdatum: _____

Bij een erkende dealer: _____

Garantie, voorwaarden

De PC-2530 Mobile-vac draagbare vacuümeenheid wordt geleverd met een garantie van 1 jaar. Volgens de standaardvoorwaarden van TPC heeft een gebruiker 7 dagen vanaf de levering van het apparaat de tijd om het terug te sturen voor een volledige terugbetaling.

Verzendkosten vallen niet onder de garantie. Als u problemen ondervindt of hulp nodig hebt bij het oplossen van storingen aan het apparaat, neem dan contact op met uw erkende TPC-tandtechnicus of onze technische helpdesk op 800-560-8222; anders kunt u onze website bezoeken voor meer informatie:

<http://www.tpcdental.com/terms.html>

Het apparaat heeft een garantie van één jaar vanaf de productiedatum, zoals bepaald door het serienummer op het productlabel. Etiketten worden op het moment van verzending gegenereerd en op het product aangebracht. TPC garandeert de oorspronkelijke koper – en in het geval van OEM's (Original Equipment Manufacturers) hun oorspronkelijke klant – dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten en uitsluitend is vervaardigd in overeenstemming met de door TPC gepubliceerde standaardcatalogusspecificaties voor het product, zoals deze op het moment van aankoop van kracht waren. Garantie of prestaties volgens andere specificaties vallen niet onder deze garantie, tenzij dit schriftelijk door TPC is overeengekomen en is vastgelegd als onderdeel van alle contracten, met inbegrip van maar niet beperkt tot inkooporders, verkooporders, orderbevestigingen, inkoopcontracten en inkoopovereenkomsten. TPC is in geen geval aansprakelijk of draagt enige verantwoordelijkheid onder deze garantie indien het product of de producten onjuist is of zijn opgeslagen, geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden, of indien de koper ongeoorloofde wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan het product of de producten heeft toegestaan. De verplichting van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst is uitsluitend beperkt tot het (naar eigen goeddunken) in de fabriek repareren of vervangen van producten of onderdelen daarvan, waarvan naar het oordeel van de verkoper is aangetoond dat ze defect zijn als gevolg van gebrekkige materialen of vakmanschap, en dit binnen de termijn die is vastgelegd

de door de verkoper vermelde productgarantie (zie de bovenstaande Algemene Voorwaarden), op voorwaarde dat het product of de producten waarvan wordt beweerd dat ze defect zijn, aan TPC worden geretourneerd, met door de koper vooruitbetaalde transportkosten, vergezeld van een schriftelijke specificatie van het geclaimde defect. Er moet voor TPC aanvaardbaar bewijs worden geleverd dat de geclaimde defecten niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing door iemand anders dan TPC.

Alle onderdelen die als slijtageonderdelen worden beschouwd, moeten regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Schade als gevolg van overmatige belasting valt niet onder deze garantie. Het gebruik van het apparaat of onderdelen onder een zodanige belasting dat zij het einde van hun verwachte levensduur bereiken, is een normaal kenmerk van de toepassing van mechanische producten. Het bereiken van het einde van de verwachte levensduur van een product duidt niet op een defect in materiaal of vakmanschap en valt niet onder deze garantie. Het gebruik van het apparaat onder omstandigheden die buiten de normale bedrijfsomstandigheden vallen, valt niet onder deze garantie.

De kosten voor het verzenden van apparaten die voor reparaties onder garantie naar de fabriek worden teruggestuurd, zijn voor rekening van de eigenaar van het product. TPC verzendt alle gerepareerde of vervangen apparaten onder garantie kosteloos via UPS Ground terug naar de klant.

De maximale aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot deze algemene voorwaarden en elke daaruit voortvloeiende verkoop, ongeacht de oorzaak, met inbegrip van maar niet beperkt tot contractbreuk of nalatigheid, zal niet hoger zijn dan de hierin gespecificeerde prijs van het product of de producten die aanleiding geven tot de claim, en in geen geval zal TPC op grond van deze garantie aansprakelijk zijn voor bijzondere, incidentele of gevolgschade, al dan niet van dezelfde of een andere aard, die voortvloeit uit of het gevolg is van de aankoop, installatie, verwijdering, reparatie, bediening, gebruik of defect van het product of de producten of om welke andere reden dan ook, met inbegrip van nalatigheid.

De voorgaande garantie geldt eveneens voor producten of onderdelen die zijn gerepareerd of vervangen op grond van deze garantie, en binnen de termijn die is vastgelegd in de door de verkoper vermelde garantie.

GEEN ENKEL PERSOON, MET INBEGRIJ VAN EEN AGENT OF VERTEGENWOORDIGER VAN TPC, IS BEVOEGD OM NAMENS TPC ENIGE VERKLARING OF GARANTIE AF TE LEGGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE DOOR TOC ZIJN VERVAARDIGD, BEHALVE OM KOPERS NAAR DEZE GARANTIE TE VERWIJZEN.

Het auteursrecht op deze handleiding, andere accessoires van dit product of productdocumentatie berust bij TPC, die zich alle rechten voorbehoudt.

Symbolen in de handleiding:



Opmerking: Er kunnen onderdelen en documentatie verloren gaan



Opmerking: Dit kan schade aan de apparatuur veroorzaken of ervoor zorgen dat de apparatuur niet goed functioneert

Aanvullende informatie:



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Aardingsaansluiting



Aan



Uit



Datum van fabricage

Inhoud

1. Korte introductie
2. Technische parameters
3. De opbouw van de apparatuur
4. Functies van de belangrijkste onderdelen
5. Onderhoud
6. Explosietekening van de ringventilator
7. Probleemoplossing
8. Overzicht van het werkingsprincipe
9. Veiligheidsmaatregelen
10. Schema van de luchtaansluiting en het elektrische circuit
11. Externe markering en inhoud
12. Paklijst

1. Korte introductie

Hartelijk dank voor de aankoop van de PC-2530; het is ons een genoegen u een multifunctioneel, elektromechanisch geïntegreerd apparaat te kunnen aanbieden dat energiezuinig, draagbaar, veilig en onderhoudsvrij is. Lees de volgende handleiding aandachtig door om uw apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

1.1 Inhoud van de handleiding

De gebruiksaanwijzing bevat een korte inleiding, technische gegevens, installatie en testprocedures, onderhoud, een exploded view van de ringventilator en dergelijke. Aan de hand van de inhoud kunt u de nodige hulp vinden.

1.2 Prestaties en opbouw

De tandheelkundige afzuigunit bestaat uit een opvangfles, een filter, een ringventilator, een gelijkstroomwaterpomp en een behuizing.

1.3 Gebruik

De afzuigunit wordt gebruikt bij de behandeling van de mondholte, omdat deze vreemde voorwerpen met kiemen, zoals speeksel en vervuild bloed, kan wegpompen en tegelijkertijd de omgeving beschermt, aangezien de voorwerpen worden verwerkt voordat ze worden weggepompt. De unit wordt voornamelijk gebruikt in klinieken en ziekenhuizen voor de behandeling van de mondgezondheid.

1.4 Veiligheidsinformatie

1.4.1 Elektrische veiligheid

- Zorg ervoor dat de stekker van dit apparaat driefasig is en goed geaard is.
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de nominale spanning overeenkomt met de opgegeven spanning die dit apparaat vereist.
- Om schommelingen in de spanning te voorkomen, mag u de stekker niet samen met andere elektrische apparatuur gebruiken.
- Voordat u onderhoud of reparaties aan het apparaat uitvoert, moet u eerst de stekker uit het stopcontact halen.
- Controleer de stekker en het snoer regelmatig op beschadigingen of knikken.

1.4.2 Reiniging

Houd de omgeving rond het product schoon en zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat reinigt.

Ga als volgt te werk bij het schoonmaken: veeg eerst het buitenoppervlak af met een zachte doek die is bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel, en gebruik vervolgens een zachte doek om het apparaat nogmaals schoon te maken.

Let op: Gebruik geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen die brandbare stoffen bevatten.

1.4.3 Overige veiligheidsinformatie

Houd u bij het gebruik van dit apparaat strikt aan de volgende regels:

1) Houd er rekening mee dat de stekker is ontworpen als veiligheidsvoorziening, niet als aan/uit-schakelaar. Zorg ervoor dat de stekker zonder moeite uit het stopcontact kan worden getrokken.

Waarschuwing: Een goede aarding is noodzakelijk om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

2) Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met ontvlambare mengsels.

3) Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met anesthetica en mengsels van lucht, zuurstof en stikstof.

4) Plaats het apparaat niet in de buurt van een zuurstofcilinder.

5) Gebruik de apparatuur niet en vervang geen onderdelen wanneer de volgende situaties zich voordoen:

- Schade aan de stekker
- Het apparaat werkt niet normaal
- Storing in de apparatuur
- Water is in het apparaat terechtgekomen
- Luid of schril geluid, oververhitte uitblaasluucht of vieze geuren tijdens het gebruik.

Neem bij het optreden van bovenstaande situaties contact op met de fabrikant of de lokale vertegenwoordiger. Om het voor ons gemakkelijker te maken om aftersales-service te bieden, verzoeken wij u om, indien nodig, een schema van het elektrische circuit, aansluitschema's voor lucht en water, de paklijst en andere nuttige informatie te verstrekken.

- 6) Gebruik een origineel of goedgekeurd desinfectieapparaat.
- 7) Schakel de stroom uit wanneer de operator de ruimte verlaat.
- 8) Voer vloeibaar en vast afval af volgens de lokale gezondheidsvoorschriften.
- 9) Gebruik en bewaar de apparatuur niet buiten de gespecificeerde omgeving.
- 10) Zorg ervoor dat accessoires niet vallen om schade te voorkomen.
- 11) Zorg ervoor dat de elektrische kabel tijdens de behandeling niet losraakt.
- 12) Gebruik uitsluitend accessoires van de oorspronkelijke fabrikant.
- 13) Zet de apparatuur op een stevige, horizontale ondergrond.

1.5 Productinformatie Naam:

Medische afzuigunit Model:

DSxxxxxx

Configuratie: zie bijgevoegde paklijst

Modellen van tandheelkundige afzuigunits: DS3701CS, DS3701CS-1, DS7501CS, DS3701M, DS2501M.

1.6 Informatie over de uitgave

Nummer van de handleiding: DL-DS –EG-1401-01.

2. Technische gegevens

2.1 Productgegevens:

Nr.	Model	Spanning	Vermogen (VA)	Luchtstroom (L/min)	Maximale onderdruk (kPa)	Geluidsniveau (dB)	Specificatie van de overbelasting beveiliging (A)
1.	DS3701CS	AC 110–230 V 50/60 Hz	600	350	-11	≤75	8
2.	DS7501CS	AC110-230 V 50/60 Hz	1200	700	-17	≤75	20
3.	DS3701CS -1	AC 110–230 V 50/60 Hz	600	350	-11	≤75	8
4.	DS3701M	AC110-230 V 50/60 Hz	600	350	-11	≤75	8
5.	DS2501M	AC 110–230 V 50/60 Hz	500	250	-8	≤75	6



Waarschuwing:

Gebruik het apparaat uitsluitend bij de nominale voedingsspanning, omdat een onstabiele stroom het apparaat kan beschadigen.

Installeer een spanningsregelaar wanneer de voedingsspanning onstabiel is en het nominale vermogen niet minder dan 4000 VA bedraagt.

2.2 Productclassificatie

2.2.1 Classificatie van de luchtstroom: zuigsysteem met hoog volume

2.2.2 Classificatie van de afzuigmethode: halfdroog systeem

2.2.3 Classificatie van het beheer van tandheelkundige apparatuur: mondzorgapparatuur en -instrumenten (code 6855), beheer van type 1

2.2.4 Classificatie van elektrische schok :
Type I-apparatuur.

2.2.5 Beschermingsgraad tegen elektrische schokken: apparatuur van type B.

2.2.6 Classificatie van waterdichtheid: Normale apparatuur (IP20).

2.2.7 Classificatie van de bedrijfsfrequentie: intermitterend gebruik.

2.3 Vervoer, opslag en gebruiksomstandigheden

2.3.1 Transportvoorwaarden

De machine moet worden vervoerd volgens de specifieke vereisten van het ondertekende contract.

2.3.2 Opslagvoorwaarden

De machine moet worden opgeslagen op een plaats met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%. De omgeving van de machine moet schoon, droog en vrij van corrosieve gassen zijn, goed geventileerd en beschermd tegen indirect zonlicht.

2.3.2 Gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur: 5°C~40°C

Relatieve luchtvochtigheid: ≤80%

Atmosferische druk: 86 kPa ~ 106 kPa

Waarschuwing: Het apparaat mag niet worden gebruikt in een ruimte waar de lucht verontreinigd is met brandbare anesthetica, omdat dit tot een explosie kan leiden.

2.4 Installatievoorwaarden

Installeer het apparaat op een stevige, horizontale ondergrond met een helling van maximaal 2°.


2.5 Stroomvoorziening

Spanningsbereik: AC 110–220 V 50/60 Hz

3. De opbouw van het apparaat


3.1.1 Opbouw van de DS3701CS



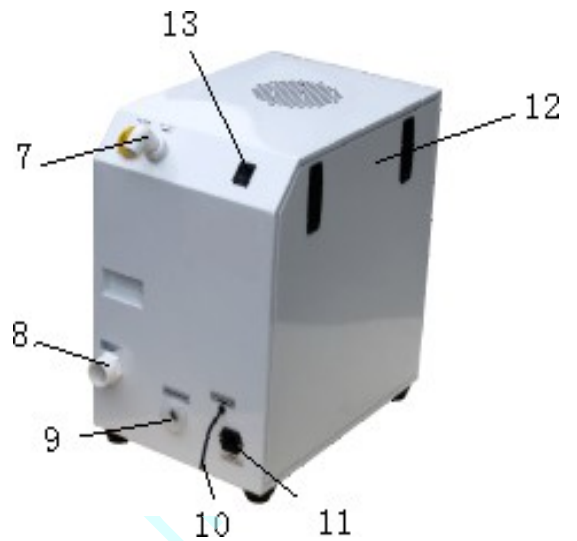


1. Filter	2. Afvoerbus	3. Behuizing	4. Voetjes
5. Ringventilator	6. Schakelkast	7. Luchtinlaat	8. Luchtuitlaat
9. Wateruitlaat	10. Besturingskabel	11. Stekker	12. Vergrendeling
13. Aan/uit-schakelaar			

3.1.2 Opbouw van de DS7501CS

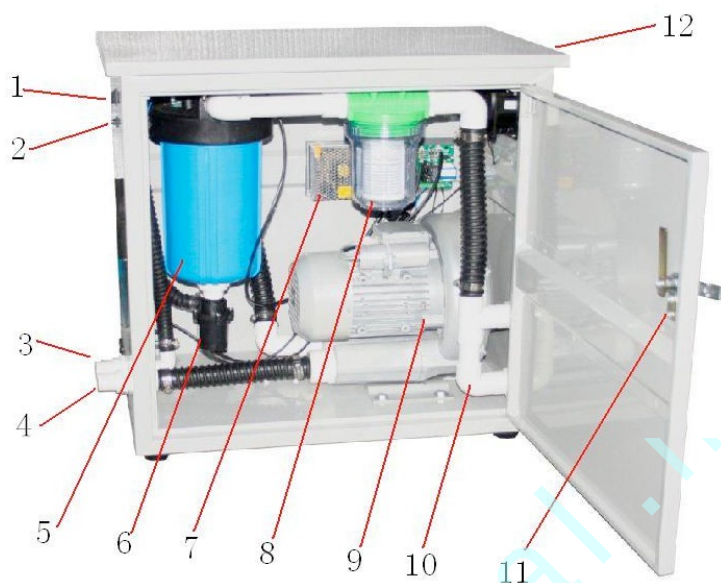

1. Aan/uit-schakelaar	2. Overbelastingsbeveiliging	3. Wateruitlaat	4. Luchtuitlaat
5. Afvoerkuik	6. Afvoerpomp	7. Gelijkstroomvoeding	8. Filter
9. Ringventilator	10. Luchtinlaat	11. Vergrendeling	12. Besturingsleiding

3.1.3 Opbouw van de DS3701CS-1

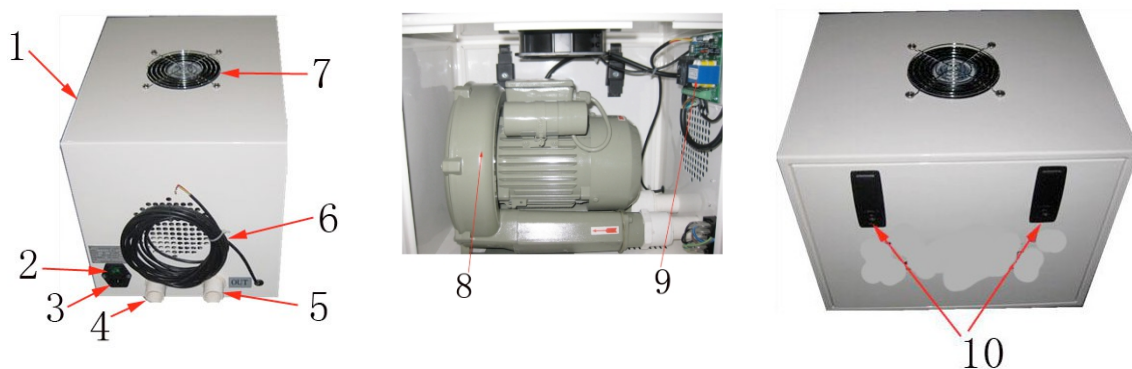

1. Behuizing	2. Aan/uit-schakelaar	3. Stopcontact	4. Luchtinlaat
5. Luchtuittlaat	6. Bedieningskabel	7. Ventilator	8. Ringventilator
9. Schakelbord	10. Vergrendeling		

3.1.3 Opbouw van de DS3701M en DS2501M



1. GROTE LUCHTVOLUME AFZUIGING	2. AFDEKKING	3. SPUUG EJECTOR	4. REK
5. FILTER	6. ACHTERKAP	7. BEHUIZING	8. AAN/UIT-SCHAKELAAR
9. STOPCONTACT	10. VENTILATOR	11. WIEL	12. VERSTERKTE KUNSTSTOF BUIS
13. BOCHT	14. AFVOER WATERAFVOER		

3.2 Installatieprocedures

3.2.1 Installatie:

(1) Controleer na het uitpakken

Controleer na het openen van de doos of alle onderdelen van het apparaat intact zijn

de doos en controleer of de reserveonderdelen intact zijn volgens de paklijst. Neem bij twijfel contact op met ons bedrijf of de lokale vertegenwoordiger.

(2) Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

De elektrische apparaten mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden geïnstalleerd

(3) Installatieomstandigheden

(a) Omgevingstemperatuur: 5°C~40°C

(b) Het apparaat moet zo worden geplaatst dat er voldoende luchtstroom rondom de machine is.

(4) Installatiemethode

(a) Installeer de apparatuur dicht bij de behandelingsunit en zorg ervoor de zuigunit lager is geplaatst dan de behandelingsunits. Houd er rekening mee dat de deur van de zuigunit om veiligheidsredenen niet zomaar geopend mag worden.

(b) De afzuigeenheid moet zo worden geplaatst dat er aan twee zijden van de behuizing 25 cm vrije ruimte zonder obstakels is.

(5) Specificaties van de verbindingсбуizen

(a) DS3701CS-leiding die de afzuigeenheid met de tandheelkundige behandelunit verbindt:

Materiaal: PPR of PVC

Binnendiameter: DS3701CS, DS3701M, DS2501M (φ20)

DS3701CS-1, DS7501CS (φ32)

Lengte: ≤5 m

Installatiehoogte: 0,5 m hoger dan de onderkant van de afzuigeenheid

(b) Leiding die de luchtuitlaat met de buitenleiding

verbindt: Materiaal: PPR of PVC

Binnendiameter: φ32

(c) Leiding die de afvoer van het afvoerwater verbindt met de buitenleiding voor afvalverwerking:

Materiaal: PPR of PVC

Binnendiameter: DS3701CS, DS3701M, DS2501M (φ20)

DS3701CS-1, DS7501CS (φ32)

Installatiehoogte: lager dan de onderkant van de afzuigeenheid

(6) Elektrische vereisten

Stroomvoorziening: zorg er bij het installeren van het stopcontact voor dat de netspanning overeenkomt met de nominale spanning en frequentie die dit apparaat vereist.

3.2.2 Test

Haal de speekselafzuiger uit de clip-on-instrumenthouder van de tandheelkundige behandelunit; de afzuigeenheid start dan automatisch. Plaats de speekselafzuiger bij de eerste test of het eerste gebruik in schoon water en controleer of er water uit de afvoeruitgang kan worden afgevoerd. Plaats de speekselafzuiger vervolgens terug in de clip-on-instrumenthouder; de afzuigeenheid wordt dan uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat de afzuigeenheid nog 5 tot 10 seconden blijft werken om vreemde voorwerpen in de slangen te verwijderen, dankzij de tijdvertragingseenheid die in het schakelbord is ingebouwd.



Waarschuwing: Gebruik de stekker niet samen met andere elektrische apparatuur om schommelingen in de spanning te voorkomen.

4. Functies van de belangrijkste onderdelen

4.1 Filter: wordt voornamelijk gebruikt om vaste deeltjes (zoals tandfragmenten en zilveramalgamdeeltjes) uit vervuild bloed en speeksel te scheiden, en om het milieu te beschermen, aangezien deze deeltjes worden opgevangen en verwerkt voordat ze worden weggepompt. (Reinig de vaste deeltjes in het filter regelmatig.)

4.2 Afvoerkrui: wordt gebruikt om de lucht te scheiden van vervuild bloed en mondvocht, en vervolgens het overgebleven mengsel op te vangen. Wanneer het mengsel in de kruik de aangegeven hoogte bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit en start het opnieuw op zodra het wordt afgetapt.

5. Onderhoud


1. Reinig de zuigslangen dagelijks door na gebruik tweemaal schoon water (telkens 1 liter) door de slangen te zuigen.

2. Reinig de afvoerkrui en het filter wekelijks.

3. Reinig de slangen om de drie maanden.

6. Explosietekening van de ringventilator

001 Windkap	006 Busblok	011 Lager	016 Koppeling
002 Schroef	007 Windtrommel	012 Elektromotor	017 Voet
003 Veerplaat	008 Lager	013 Rubberen pakking	
004 Waaier plaat	009 Lagerblok	014 Kern	
005 Waaier	010 Rotor	015 Rookgasafvoerpijp	

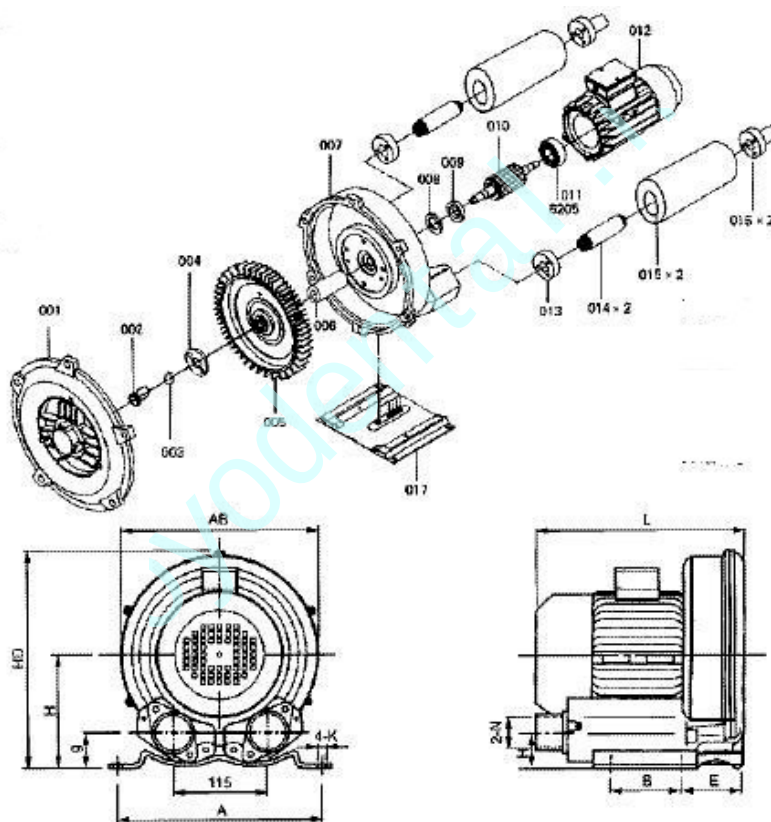

7. Problemen oplossen

	Probleem	Oorzaak	Controleer
1	Werkt niet bij zeer zwakke zuigkracht	De luchtinlaat is geblokkeerd	Controleer de luchtinlaat
		Het filter is verstopt	Controleer het filter
2	De compressor kan niet worden gestart en trilt en lawaai maakt	De voedingsdruk is te laag.	Verhoog de druk of gebruik een manostaat.
3	De pomp werkt niet.	De stroom staat niet aan	Controleer of de correct is aangesloten
		Er is eenzekering doorgebrand	Controleer of dezekering is doorgebrand
		De overbelastingsbeveiliging is teruggeveerd	Controleer of de overbelastingsbeveiliging is geactiveerd
		De draad naar de voeding is losgeraakt of een elektronisch onderdeel zit los	Controleer het patchbord en de elektrische aansluiting van de compressor

8. Overzicht van het werkingsprincipe

Werkingsprincipe van de ringventilator: De waaier van de ringventilator bevat talrijke bladen aan de rand en is speciaal ontworpen voor een hoge luchtdruk. Wanneer de waaier draait, wordt de lucht tussen de schoepen versneld in de richting van de ventilatorschoepen. Door de draaiende beweging komt de lucht, nadat deze de buitenste luchtlaag is binnengekomen, terug naar de basis van de schoepen onder invloed van het drukverschil. Deze cyclus herhaalt zich meerdere keren, waardoor de lucht spiraalvormig stroomt en de druk toeneemt. De lucht wordt snel uitgestoten omdat de druk daar hoger is dan de druk in het systeem wanneer de lucht door de uitlaat stroomt.

Werkingsprincipe: Sluit de afzuigenheid aan op de tandheelkundige behandelunit, haal de speekselafzuiger uit de clip-on instrumenthouder van de tandheelkundige behandelunit, waarna de afzuigenheid automatisch start om vreemde voorwerpen die aan speeksel zijn gehecht (zoals mondafscheiding en vervuild bloed) in het filter te zuigen. Het filter scheidt vaste

deeltjes (zoals tandfragmenten en zilveramalgamdeeltjes) van het vervuilde bloed en de mondafscheiding (verwijder de vaste deeltjes in het filter regelmatig). Het gefilterde vervuilde bloed en de mondafscheiding worden in de afvoerkruijk gezogen; de lucht-waterafscheider scheidt de lucht van het vervuilde bloed en de mondafscheiding om ervoor te zorgen dat de lucht die aan de ringventilator wordt toegevoerd schoon is en om corrosieschade aan de waaiers te voorkomen.


9. Veiligheidsmaatregelen

1. Zorg er tijdens het gebruik van tandheelkundige afzuigunits voor dat er geen voorwerpen in de buurt van de luchtcompressor komen.
2. Reinig het filter regelmatig.
3. Vervang de elektrische onderdelen tijdig, maar schakel eerst de stroom uit.
4. Schakel de stroom uit wanneer u de tandheelkundige afzuigunits reinigt en onderhoudt.
5. Verplaats de afzuigunits na de installatie niet te vaak, om de werking ervan niet te beïnvloeden.
6. Verbied onbevoegde personen het gebruik van de luchtcompressor om verkeerd gebruik te voorkomen.
7. Het onderhoud aan de afzuigunits mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
8. Laat ouderen en kinderen niet in contact komen met de compressor om letsel te voorkomen.
9. Gebruik de afzuigunits niet wanneer u weet dat dit letsel tot gevolg kan hebben.
10. Wanneer de tandheelkundige afzuigunits buiten gebruik worden gesteld, moeten de condensator en de elektrische componenten worden afgevoerd volgens de lokale wet- en regelgeving.

10. Schema van de luchtaansluiting en het elektrische circuit


10.1 DS7501CS-luchtaansluiting

Opmerking: De pijl geeft de luchtstroomrichting aan.

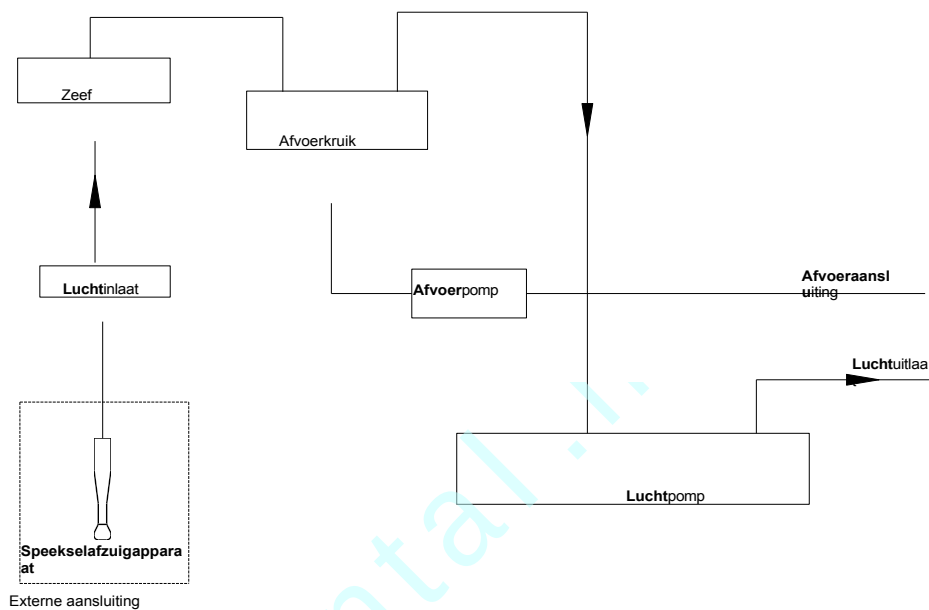


10.2 DS3701CS-luchtaansluiting

Opmerking: De pijlen geven de richting van de luchtstroom aan.

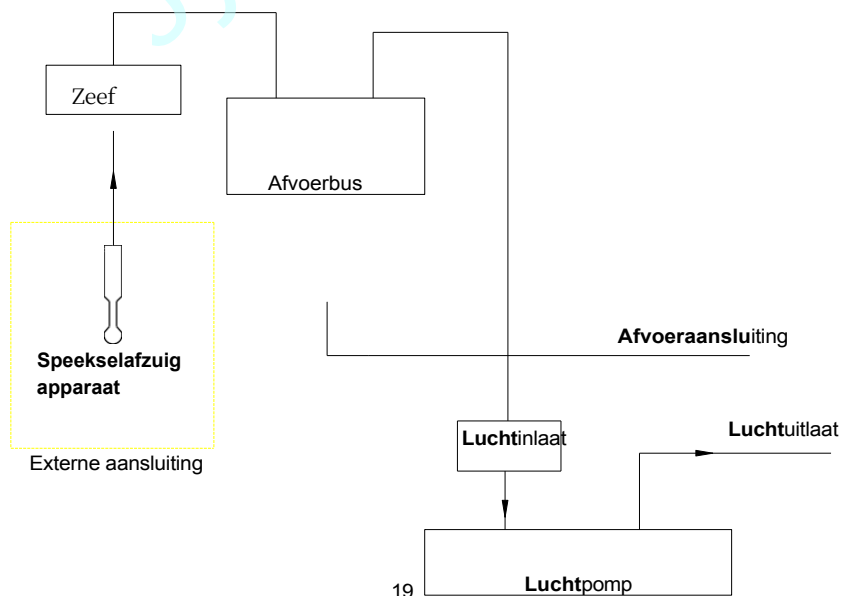


10.3 DS3701CS-1 luchtaansluiting

Opmerking: De pijl geeft de luchtstroomrichting aan.

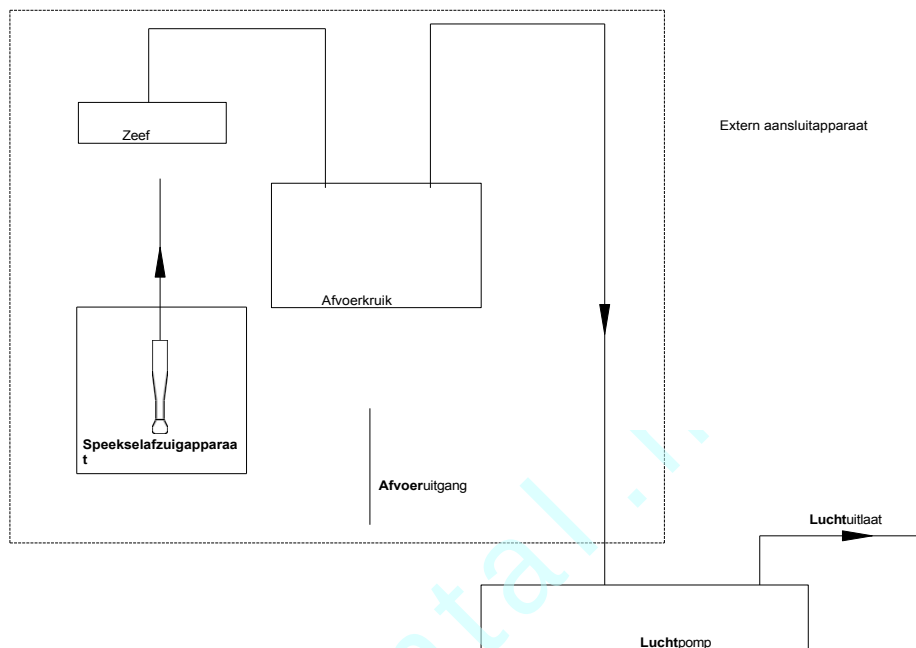

10.4 DS3701M, DS2501M luchtaansluiting

Opmerking: De pijlen geven de richting van de luchtstroom aan.

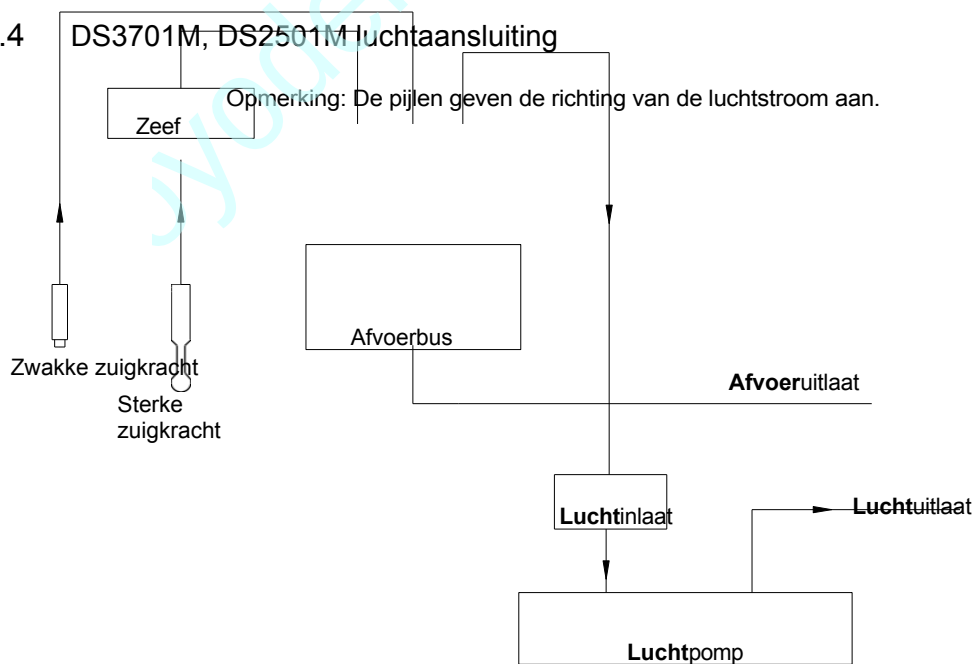


01CS, DS3701CS-1 elektrisch schema




01CS, DS3701CS-1 elektrisch schema



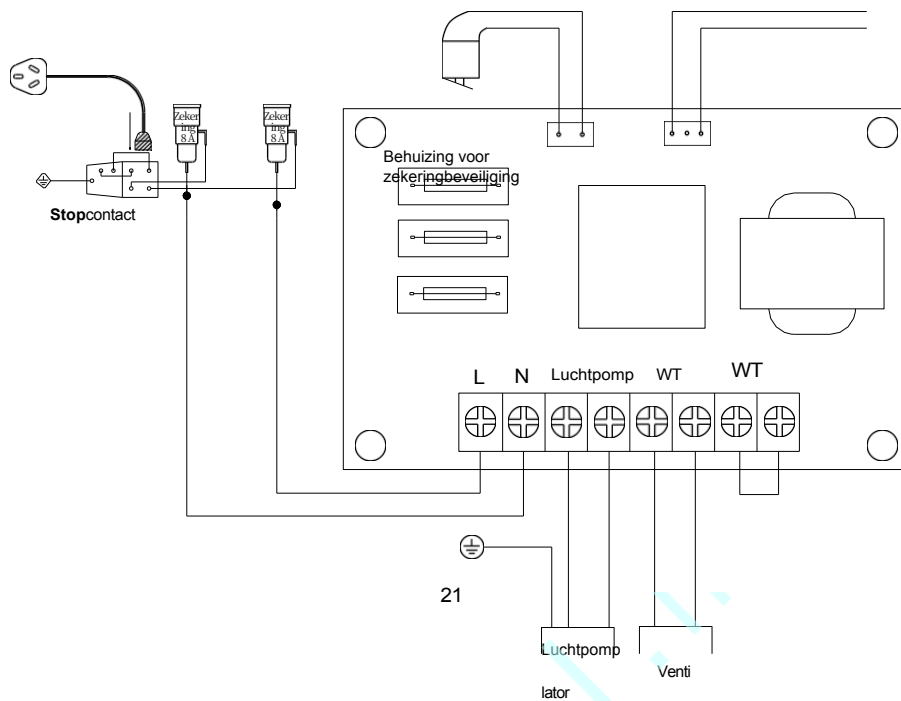

10.7 DS370M, DS2501M elektrisch schema

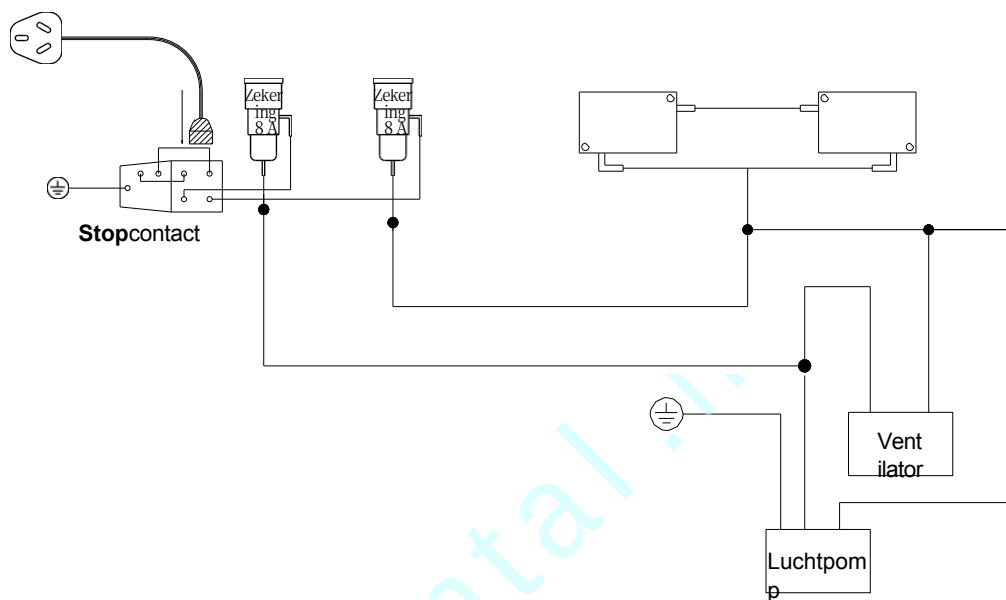


11. Externe markering en inhoud

1. De volgende gegevens staan op de buitenverpakking: Productnaam: Medische afzuigunit
2. Model: DU
3. Standaardnr.:
4. Productregistratienummer:
5. Naam van de fabriek: Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd
Adres van de fabriek: Nr. 108 Xingpu Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu, 215331, Volksrepubliek China
6. Verpakkingsafmetingen
: Buitenafmetingen:
L×B×H


Bruto gewicht: kg

Nettogewicht: kg

7. Merk:

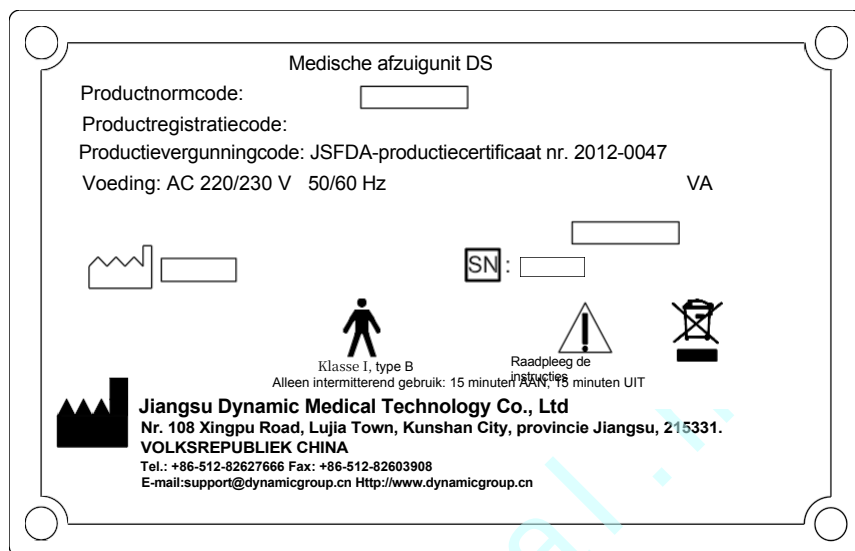

8. Grafieklabel:

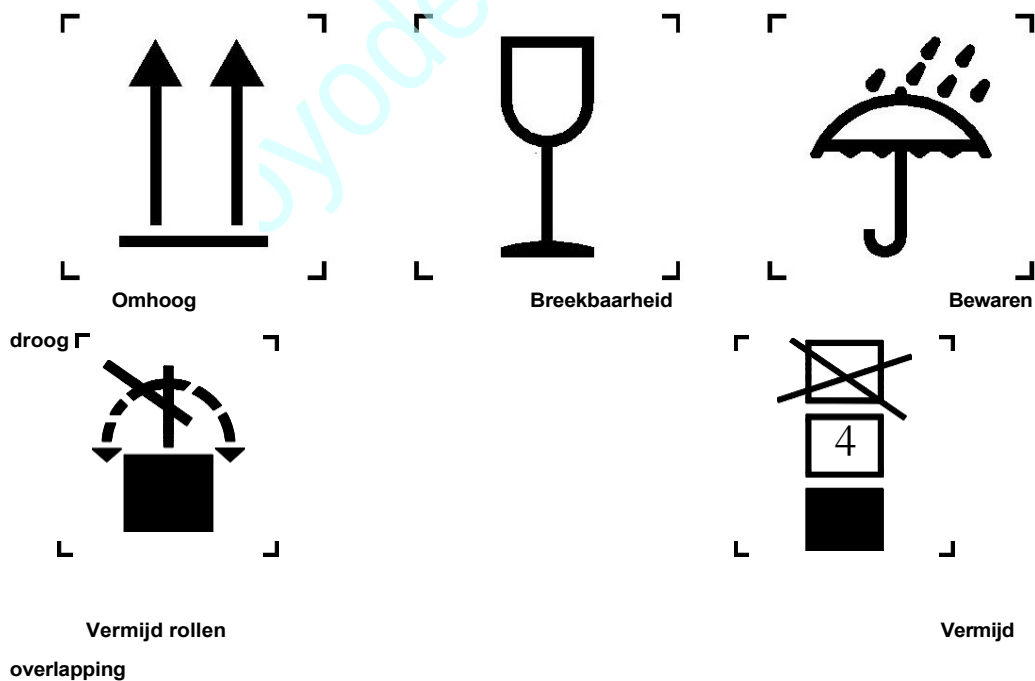

12. Dertien: Paklijst

Nee	Naam	Aantal	Opmerking
1	Afzuigunit	1 stuk	DS3701CS, DS3701CS-1, DS7501CS, DS3701M, DS2501M
2	Veerleiding 3 mm (diameter: 32 m)	1 stuk	DS7501CS, DS3701CS-1
3	Metalen beugel $\Phi 32$	6 stuks	DS7501CS, DS3701CS-1
4	Veerpijp 3 mm (diameter: 20 m)	1 stuk	DS3701CS, DS3701M, DS2501M
5	Metalen beugel $\Phi 20$	6 stuks	DS3701CS, DS3701M, DS2501M
6	Voedingskabel	1 stuk	DS3701CS, DS3701CS-1, DS7501CS, DS3701M, DS2501M
7	Zekering	3 stuks	DS3701CS, DS3701CS-1, DS7501CS, DS3701M, DS2501M
8	Gebruiksaanwijzing	1 stuk	DS3701CS, DS3701CS-1, DS7501CS, DS3701M, DS2501M

851 South Lawson Street,
City of Industry, CA 91748
800-560-8222 – 626-810-4245
www.tpcdental.com

oyodental.nl