

Garantieverklaring:

Op al onze verkochte producten geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum tegen fabricage- en materiaalfouten, tenzij anders vermeld. TPC zal defecte onderdelen kosteloos repareren of vervangen. TPC is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten of verzendkosten van en naar de TPC-vestiging. Deze garantie dekt geen normale slijtage of vlekken op de oppervlakteafwerking. De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuiste installatie, verkeerd gebruik of ongevallen tijdens verzending en hantering. Alle claims tegen de vervoerder moeten worden ingediend op het moment dat de beschadigde artikelen worden ontvangen. Het indienen van de claim is de verantwoordelijkheid van de klant. Wij verbeteren onze producten voortdurend. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen en zijn niet verplicht om eerder geproduceerde artikelen aan te passen. Lampen en batterijen vallen niet onder enige vorm van garantie.

TPC *Advanced Technology, Inc.*

PC 2530 Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave.

1. Voorpagina
2. Inhoudsopgave + Markeringen
3. Eerste installatie
4. Eerste installatie
5. Algemene gebruiksaanwijzing
6. Verzorging en onderhoud
7. Problemen oplossen
8. Achterpagina: garantieverklaring

Markeringen

Let op: risico op verlies van accessoires en documenten

Waarschuwing: Gevaar voor letsel of storingen

Lees de handleiding zorgvuldig door.

Aardingsbescherming

Elektronische afvalbak

Productiedatum


Aan

Uit

Het apparaat gaat niet aan:

De zuigkracht is laag

Afbeeldingen

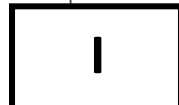

Het apparaat maakt veel lawaai wanneer de motor draait.

Het apparaat gaat aan, maar wanneer ik de zuigklep verwijder, start de motor niet.

De zekering blijft doorslaan

Er loopt tijdens het gebruik nog steeds afval uit de achterkant van de machine.

Problemen oplossen

Controleer het netsnoer.
Controleer de aan/uit-schakelaar.

Controleer de zekering. De zekering is 250 V, 15 A, 5 x 20 mm

Als er geen groen lampje brandt, is er geen stroom naar de hoofdschakelaar. Controleer de zekering. Controleer het stopcontact. Controleer de interne zekeringen op de hoofdprintplaat.

Controleer de zuigklepspoelen en zorg ervoor dat er slechts één in de open stand staat.

Controleer de opvangbak voor vaste afvalstoffen. Reinig of vervang deze indien nodig.

Controleer of er interne lekken in de machine zijn.

De motor moet in toeren omhoog gaan zodra hij in de aan-stand staat. Controleer op eventuele verstoppingen in de zuigleiding als de motor overbelast lijkt te raken. Als de motor luide, schrille geluiden maakt, stop dan met het gebruik en neem contact op met de TPC-helpdesk.

Controleer de interne afvalcontainer en zorg ervoor dat deze leeg is. Controleer de niveausensoren in de tank en zorg ervoor dat deze schoon zijn. Als de sensoren gecorrodeerd zijn, moet u ze mogelijk schoonmaken met een schuurdoek of -pad. Kortsluiting of storing in het elektrische circuit. Neem contact op met de technische ondersteuning van TPC voor verdere hulp.

Controleer de terugslagklep van de interne afvalcontainer. Reinig deze en plaats hem indien nodig terug.

Verzorging en onderhoud

Reinig de opvangbak voor vaste stoffen of vervang deze indien nodig.

Schakel het apparaat uit. Draai het deksel van de vaste-stoffencontainer tegen de klok in en verwijder het deksel. Verwijder de opvangbak en vervang deze indien nodig. De afmeting van de opvangbak is 2 1/8". Artikelnummer: 53016-L



Na gebruik wordt aanbevolen om schoon water door de machine te laten lopen. Zuig ongeveer twee kopjes water door de zuigleidingen en laat de afvalcontainer leeglopen. Hierdoor worden eventuele resten afval uit de leidingen verwijderd.



Mocht er een doorgebrande zekering zijn, dan zijn deze op twee plaatsen te vinden. De interne stroomaansluiting heeft een zekering van 15 ampère, 250 volt, 5 x 20 mm.



De secundaire zekering bevindt zich op de hoofdprintplaat




Het apparaat klaarmaken voor gebruik

Sluit de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting aan de achterzijde van het apparaat, zoals afgebeeld.

Vervangend netsnoer:

Onderdeelnummer: PC2530N-PC

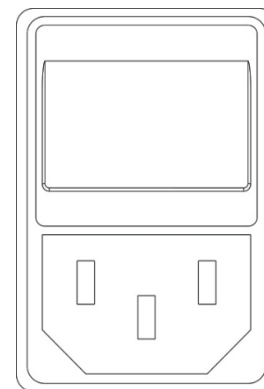

Zet de aan/uit-schakelaar in de stand „aan“ en de luchtcompressor van het apparaat start.

Zet de aan/uit-schakelaar in de stand 'uit' om het gebruik te beëindigen.



Plaats de afvalcontainer aan de achterzijde van het PC 2630-apparaat.



Het apparaat klaarmaken voor gebruik

Plaats de afvalcontainer op de richel zoals afgebeeld.



Installeer de afvoerslang zoals afgebeeld



Plaats het apparaat op de gewenste locatie voor gebruik. Vergrendel de wielen zodra het apparaat zich in de gewenste werkpositie bevindt. Ontgrendel de wielvergrendeling om het apparaat te verplaatsen.



Algemene gebruiksaanwijzing

Til de gewenste zuigklep op die u wilt gebruiken. Zodra de zuigklep van de hanger is verwijderd, schakelt de motor automatisch in.

Zorg ervoor dat de hendels van de overige zuigkleppen in de gesloten stand staan.

Plaats de zuigklep terug in de houder en de motor schakelt automatisch uit.



Als de interne afvalcontainer tijdens het gebruik vol raakt, schakelt de motor automatisch uit. Zodra dit gebeurt, begint het apparaat de interne afvalreservoir automatisch te ledigen in de afvalcontainer aan de achterzijde van de machine.

Zodra het leeglopen is voltooid, schakelt de motor automatisch weer in.

Opmerking: Als de schakelaar van de HP-houder vast komt te zitten in de 'aan'-stand, blijft de motor van het apparaat draaien



oyodental.nl