

AMALGAMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING

G5



G6



G10



G8



Geachte klanten,

Hartelijk dank voor de aankoop van de Amalgamator. Lees voor de zekerheid de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze in de buurt van het apparaat, zodat u deze op elk moment kunt raadplegen.

Houd u tijdens het gebruik strikt aan de voorschriften en vergeet niet om het apparaat correct en regelmatig te onderhouden.

In het kader van een doorlopende strategie behoudt ons bedrijf zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aan het apparaat aan te brengen.

Voor dit product is een nationaal octrooi aangevraagd (octrooinummer: ZL 2005 2 00149421.1); namaakproducten zullen worden vervolgd.

I. Opmerkingen over de medische apparaten

1. Het apparaat mag uitsluitend worden bediend door professionals en daartoe aangewezen personen.

2. Aanwijzingen voor het plaatsen van het apparaat:

- 1) Het moet worden geplaatst op een plek die niet in contact komt met water of enige andere vloeistof.
- 2) Het moet worden bewaard en gebruikt op een plaats waar geen nadelige invloed van luchtdruk, temperatuur, vochtigheid, ventilatie, zonlicht, stof, zout, ionen enz. optreedt.

- 3) Het moet stevig en stabiel worden geplaatst, zonder dat het kantelt, trilt of aan stoten wordt blootgesteld.
- 4) Het moet uit de buurt van chemicaliën en chemische gassen worden gehouden.
- 5) Het stopcontact moet geschikt zijn voor de vereiste spanning en stroomsterkte van het apparaat. Zorg ervoor dat het stopcontact en de kabels correct zijn aangesloten; het apparaat vereist een apart stopcontact met veiligheidsaarding.

3. Opmerkingen vóór gebruik

- 1) Controle is verplicht vóór gebruik. Zorg ervoor dat er geen afwijkingen aan het uiterlijk zijn, met name geen water, dat de elektrische aansluitingen van het stopcontact intact zijn zonder scheuren of breuken, en dat de schakelaar en het indicatielampje normaal functioneren.
- 2) Zorg voor een correcte en stabiele veiligheidsaarding.
- 3) Zorg ervoor dat de voedingsspanning en -frequentie voldoen aan de vereisten.
- § Verwijder vóór gebruik de schroeven aan de onderzijde van het apparaat die dienen voor de bevestiging.
- 4) Om geluid te verminderen, maakt de amalgamator gebruik van een veerdempingssysteem. Tijdens het transport zijn rode schroeven (3 stuks bij G5, G6 en G10 en 2 stuks bij G8) onder het apparaat bevestigd ter bescherming tegen beschadiging. Verwijder de rode schroeven alstublieft voordat u het apparaat in gebruik neemt en leg ze apart.

4. Opmerkingen bij het gebruik

- 1) Specifiek gebruik: tandheelkundige amalgamator. Het apparaat wordt gebruikt voor het mengen van tandheelkundige restauratiematerialen, zoals amalgaamcapsules en glasionomeercapsules.
- 2) Controleer nauwlettend of er zich ongewone verschijnselen voordoen. Als er zich een afwijking voordoet, schakel dan het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 3) Houd patiënten uit de buurt van het apparaat.

5. Aanwijzingen na gebruik

- 1) Voer een grondige controle uit volgens de voorschriften voordat u de schakelaar uitschakelt.
- 2) Wanneer de schakelaar is uitgeschakeld, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken in plaats van de stekker naar beneden te duwen.
- 3) Onderhoudsvoorschriften:
 1. Het apparaat moet worden geplaatst op een plek die niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
 2. Het apparaat moet worden bewaard en gebruikt op een plek waar geen nadelige invloed is van luchtdruk, temperatuur, vochtigheid, ventilatie, zonlicht, stof, zout, ionen enz.
 3. Het apparaat moet stevig en stabiel worden geplaatst, zonder kanteling, trillingen of de kans op stoten.
 4. Het moet uit de buurt van chemicaliën en chemische gassen worden gehouden.

4) Om een normaal gebruik van het apparaat te garanderen, moeten het apparaat en de bijbehorende accessoires na het reinigen op de juiste wijze worden opgeborgen.

5) Indien het apparaat opnieuw moet worden vervoerd, moeten de schroeven aan de onderzijde van het apparaat worden vastgedraaid.

6. Het is verboden het apparaat zelf te demonteren of te repareren wanneer er problemen optreden. Neem tijdig contact op met de distributeurs om het door professionals te laten repareren.

7. Het is verboden het apparaat te modificeren; anders bent u verantwoordelijk voor de gevolgen en verliest u uiteindelijk de garantie.

8. Regelmatige controle en onderhoud

1) Onder normale omstandigheden wordt een dagelijkse controle vóór gebruik en wekelijks onderhoud aanbevolen.

2) Als het apparaat een tijdje niet is gebruikt, moet de veiligheid en werking worden gecontroleerd voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen. Gebruik is alleen toegestaan als alles in orde is.

3) Onderhoudsinterval: het apparaat moet na één jaar normaal gebruik worden onderhouden, met name wat betreft de strakheid en stevigheid van klemmen en veren. Als deze los zitten of gebroken zijn, vervang ze dan tijdig.

9. Overige belangrijke opmerkingen

Elke afwijking van de instructies kan storingen, gevaar of ongevallen veroorzaken; wees daarom altijd alert. Het is verboden het apparaat te gebruiken tenzij u de instructies zorgvuldig hebt gelezen en de vereisten en normen hebt nageleefd.

II. Om de veiligheid bij het gebruik van het apparaat te waarborgen, moeten de regels worden nageleefd.

1. In geval van geïnduceerde elektriciteit moet het apparaat ver uit de buurt van een gootsteen of vochtige plaatsen worden gehouden.

2. Het apparaat moet worden schoongemaakt en in een droge en goed geventileerde ruimte zonder corrosieve gassen worden geplaatst voor noodgevallen.

3. Om te voorkomen dat de metalen onderdelen gaan roesten, mag het apparaat niet worden bewaard op plaatsen met hoge temperaturen of vocht.

4. De handleiding beschrijft het veilige gebruik van het apparaat in detail; zorg ervoor dat u deze bij het apparaat bewaart en lees deze zorgvuldig en regelmatig door.

***Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor de volgende problemen:**

1. Mechanische schade en persoonlijke ongevallen veroorzaakt door het aanpassen, demonteren of repareren van het apparaat door personeel van buiten ons bedrijf of door niet-aangewezen personen.

2. Mechanische schade en ongevallen veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet door ons zijn goedgekeurd.

3. Mechanische schade en persoonlijke ongevallen veroorzaakt door het niet opvolgen van de handleiding en opmerkingen.
4. Mechanische schade en persoonlijke ongevallen veroorzaakt door het niet naleven van de vereisten inzake spanning, aarding en omgeving.
5. Mechanische schade en ongevallen veroorzaakt doordat de stelschroeven aan de onderzijde van het apparaat niet zijn verwijderd vóór gebruik.
6. Mechanische schade veroorzaakt doordat de stelschroeven na gebruik niet zijn vastgezet tijdens het transport.
7. Mechanische schade en persoonlijke ongevallen veroorzaakt door natuurrampen zoals aardbevingen, brand, overstromingen en blikseminslag.
8. Klemmen en veren raken gemakkelijk beschadigd; de kosten voor het vervangen of vernieuwen hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Opmerkingen bij de inleiding:

△ Let op

Als u deze aanwijzingen negeert, kan dit leiden tot mechanische schade en persoonlijke ongevallen.

△ Let op

Als u deze instructies negeert, kan dit leiden tot mechanische schade en persoonlijke ongevallen.

III. Type en specificaties

1. Productnaam: Tandheelkundige amalgaammachine

2. Specificaties: G5

G6

G10

G8

3. Voeding: AC 110 V, 60 Hz ☐

AC 120 V, 60 Hz ☐

AC 220 V, 50 Hz ☐

AC 230 V, 50 Hz ☐

AC 240 V, 50 Hz ☐

4. Motorvermogen: 40 W

5. Geluidsniveau: ≤65 dB(A);

6. Normale bedrijfsomstandigheden:

a) Omgevingsomstandigheden: temperatuur 20 °C~25 °C

b) Relatieve luchtvochtigheid: 40%~60%

c) Barometrische luchtdruk: 86 kPa~106 kPa

7. Uitgebreide prestatievergelijking:


Specificatie	Snelheid	Timer bereik (s)	Gehele Gewicht (g)	Afmetingen (mm)
G5	≥4200 tpm	4~60	2600	285 × 245 × 225
G6	Hoge snelheid ≥4200 tpm Lage snelheid: 2800 tpm	4~60	2600	285 × 245 × 225
G10	2800~5000 tpm	1~99	2600	285 × 245 × 225
G8	2800~5000 tpm	1~99	2000	260 × 220 × 190

8. Classificatie van de apparaten: I: medische apparaten; II-B: elektrische apparaten, algemene apparaten, niet-AP- of niet-APG-apparaten, kunnen continu werken.

9. Levensduur: 5 jaar.


IV. Benamingen van onderdelen en hun functies:

1. Onderdelen van G5 en G6 (ze zien er ongeveer hetzelfde uit):

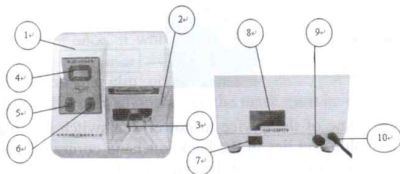


1. Behuizing 2. Masker 3. Klem 4. LCD-scherm 5. Timer
6. Start/stopknop 7. Schakelaar 8. Typeplaatje 9. Zekering 10. Voedingskabel

2. Onderdelen van de G10:

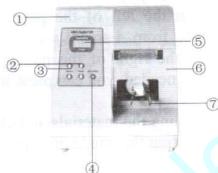

1. Behuizing 2. Timer 3. Draaiknop voor snelheidsinstelling 4. Start-/stopknop
5. LCD-display 6. Masker 7. Clip


3. Onderdelen van de G8

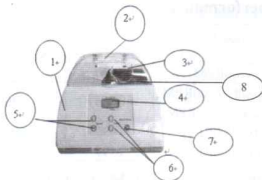

1. Behuizing 2. Masker 3. Clip 4. LCD-display
5. Draaiknop voor snelheidsinstelling 6. Timer 7. Start-/stopknop
8. Rubberen opvangbak (voor het geval er vloeistof, stof, capsules en dergelijke in de machine vallen)

4. Bedieningsonderdelen:

1) G5:

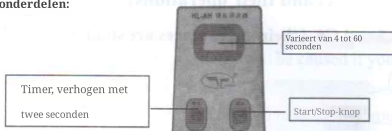

1) Schakelaar:

Sluit de voedingskabel van het apparaat aan op het stroomnet. De schakelaar is zwart, heeft de vorm van een schip en bevindt zich in de linkerachterhoek van het apparaat. Zet de schakelaar aan; het LCD-scherf licht op en het apparaat is nu ingeschakeld. Het getal op het LCD-scherf is de ingestelde tijd.

2) Digitale tijdregelaar:

Deze wordt gebruikt om de bedrijfstijd correct in te stellen en bestaat uit een LCD-scherf, een timer en een start-/stopknop. Het LCD-scherf toont de ingestelde tijd; de timerknop bevindt zich aan de linkerkant van het paneel en wordt gebruikt om de bedrijfstijd willekeurig in te stellen tussen 4 en 60 seconden (in stappen van 2 seconden); de Start/Stop-knop bevindt zich aan de rechterkant van het paneel. Druk er één keer op om het apparaat één keer te laten werken. Als u het apparaat wilt pauzeren, kunt u er ook op drukken.


3) Kap en klem:

Open het masker bij het plaatsen van de materialen en sluit het tijdens het gebruik. De klem aan de binnenkant dient voor het vastzetten van de amalgaamcapsule.

2) G6:

Specificatie: De werking van de G6 is vergelijkbaar met die van de G5, met uitzondering van de draaisnelheid. Omschakelmethode van de G6: Druk tegelijkertijd op de timer en de start-/stopknop.

3) G10:

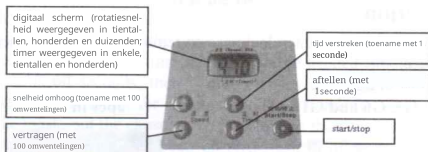

1) Schakelaar:

De schakelaar is zwart, heeft de vorm van een schip en bevindt zich in de linkerachterhoek van het apparaat. Zet de schakelaar aan, het LCD-scherm licht op en het apparaat is ingeschakeld. Het getal op het LCD-scherm geeft de huidige draaisnelheid aan.

2) Timer en instelling van het toerental: deze bevinden zich op het voorpaneel.

3) Start-/stopknop: deze bevindt zich in de rechteronderhoek van het paneel. Druk één keer op de knop om het apparaat te starten; het werkt dan één keer. Als u het apparaat wilt pauzeren, drukt u ook op de knop.

4) Masker en capsuleclip: open het veiligheidsmasker en plaats de tandheelkundige restauratiematerialen in de clip. Tijdens het gebruik moet het masker gesloten zijn.

4) G8:

De bediening van de G8 is hetzelfde als die van de G10.

Aanbeveling voor de mengtijd van de capsules.

Merk	Laten we de GK-amalgaamcapsule als voorbeeld nemen (Ag 43%, Sn 32%, Cu 25%)			
Specificaties van de -amalgaamcapsule	GK-legering, -poeders 200 mg	GK-legering () poeder 400 mg	GK-legering -poeders 600 mg	GK-legering -poeders 800 mg
Aanbevolen tijd	12-16 s	12-16 s	12-18 s	16-20 s


V. Gebruik:

⚠ Let op

Gebruik een schroevendraaier en draai deze tegen de klok in om de rode bevestigingsschroeven onder het apparaat los te draaien. (Zoals weergegeven in de afbeelding)

3 stuks in G5, G6 en G10

2 stuks in G8

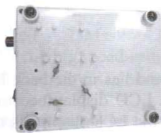

⚠ Let op

Laat het apparaat bij het eerste gebruik 60 seconden op hoog toerental stationair draaien; dit is gunstig voor de afstelling ter plaatse en verlengt de levensduur.

1. Gebruik van de G5:

- 1) Sluit het apparaat aan, druk op de zwarte schakelaar op het achterpaneel; het LCD-scherm licht op.
- 2) Stel de mengtijd in. Druk kort op de timer, de tijd wordt met 2 seconden verlengd; houd de knop lang ingedrukt, de tijd wordt snel verlengd tot de gewenste tijd (de maximale tijd is 60 seconden, daarna daalt deze naar 4 seconden) en de timer onthoudt de ingestelde tijd (bijv. 004 staat voor 4 seconden en 060 staat voor 60 seconden).
- 3) Open het masker, plaats de capsule in de klem en sluit het masker vervolgens. (Om de veiligheid te waarborgen, geeft het apparaat bij een fout een piepsignaal in plaats van te werken terwijl het masker open is.) Voor dit ontwerp is met succes een nationaal octrooi aangevraagd, met nummer ZL 2005 2 0014942.1.
- 4) Druk op de Start/Stop-knop; het apparaat start. Ondertussen geeft het LCD-scherm de tijd weer, die overeenkomstig afloopt totdat de tijd om is, waarna een pieptoon klinkt en het apparaat automatisch stopt met werken.
- 5) Schakel het apparaat uit en haal de capsule eruit; het mengen is voltooid.

2. Gebruik van de G6:

- 1) Sluit het apparaat aan op het stopcontact, druk op de zwarte schakelaar op het achterpaneel; het LCD-scherm licht op.
- 2) Kies de hoge of lage snelheid afhankelijk van de specifieke capsule. Stappen om tussen de twee snelheden te schakelen: druk tegelijkertijd op de Start/Stop-knop en de timerknop,

als het LCD-scherm „H“ weergeeft, betekent dit hoge snelheid (amalgamcapsules komen overeen met hoge snelheid); druk nogmaals op de twee knoppen; het verandert in „L“, wat staat voor lage snelheid.

3) Stel de mengtijd in. Druk kort op de timer; de tijd wordt met 2 seconden verlengd; houd de knop lang ingedrukt; de tijd wordt snel aangepast naar de gewenste tijd (de maximale tijd is 60 seconden, daarna wordt de tijd teruggezet naar 4 seconden) en de timer onthoudt de ingestelde tijd (bijv. 004 staat voor 4 seconden en 060 staat voor 60 seconden).

4) Open het masker, plaats de capsule in de klem en sluit het masker vervolgens. (Om de veiligheid te waarborgen, geeft het apparaat bij een fout een pieptoon in plaats van te werken terwijl het masker open is); voor dit ontwerp is met succes een nationaal octrooi aangevraagd, met nummer ZL 2005 2 0014942.1.

5) Druk op de Start/Stop-knop; het apparaat start. Ondertussen geeft het LCD-scherm de tijd weer, die dienovereenkomstig afloopt totdat de tijd om is, waarna een pieptoon klinkt en het apparaat automatisch stopt met werken.

6) Schakel het apparaat uit en verwijder de capsule; het mengen is voltooid.

3. Gebruik van de G10:

1) Sluit het apparaat aan op het stopcontact, druk op de zwarte schakelaar op het achterpaneel; het LCD-scherm licht op.

2) Stel de mengtijd in. Druk op de knop 'tijd omhoog' of 'tijd omlaag'; op het LCD-scherm wordt de tijd weergegeven. Druk op de timer om de tijd met 1 seconde te verhogen of te verlagen. Als u de timer lang ingedrukt houdt, wordt de tijd snel aangepast naar de gewenste tijd. (De insteltijd varieert van 1 tot 99 seconden) en de timer onthoudt de instelling. (Bijvoorbeeld: 036 staat voor 36 seconden. Druk één seconde op 'tijd omhoog', dan wordt het 037; druk één seconde op 'tijd omlaag', dan wordt het 036.)

3) Stel de mengsnelheid in. Druk op de knop 'snelheid omhoog' of 'snelheid omlaag'; het LCD-scherm geeft de snelheid weer. Druk kort op 'snelheid omhoog' en de snelheid neemt met 100 omwentelingen toe; druk kort op 'snelheid omlaag' en de snelheid neemt met 100 omwentelingen af. Als u de knop 'snelheid omhoog' of 'snelheid omlaag' lang ingedrukt houdt, neemt de snelheid snel toe of af. (Het instelbereik voor de snelheid ligt tussen 2.800 en 4.700 omwentelingen). (Bijvoorbeeld: 3200 staat voor 320 omwentelingen. Druk op de knop 'snelheid verhogen' voor 100 omwentelingen, dan wordt het 330; druk op de knop 'snelheid verlagen' voor 100 omwentelingen, dan wordt het 310.)

4) Open het masker, plaats de capsule in de klem en sluit het masker vervolgens. (Om de veiligheid te waarborgen, geeft het apparaat bij een fout een pieptoon in plaats van te werken terwijl het masker open is); voor dit ontwerp is met succes een nationaal octrooi aangevraagd, met nummer ZL 2005 2 0014942.1.

5) Druk op de Start/Stop-knop; het apparaat start. Ondertussen geeft het LCD-scherm de tijd weer, die dienovereenkomstig afloopt totdat de tijd om is, waarna een pieptoon klinkt en het apparaat automatisch stopt met werken.

6) Schakel het apparaat uit en verwijder de capsule; het mengen is voltooid.

4. Gebruik van de G8:

- 1) Sluit het apparaat aan op het stopcontact, druk op de zwarte schakelaar op het achterpaneel; het LCD-scherf licht op.
- 2) Stel de mengtijd in. Druk op de knop 'tijd omhoog' of 'tijd omlaag'; op het LCD-scherf wordt de tijd weergegeven. Druk op de timer om de tijd met 1 seconde te verhogen of te verlagen. Als u de timer lang ingedrukt houdt, wordt de tijd snel aangepast naar de gewenste tijd. (De insteltijd varieert van 1 tot 99 seconden) en de timer onthoudt de instelling. (Bijvoorbeeld: 036 staat voor 36 seconden. Druk één seconde op 'tijd omhoog', dan wordt het 037; druk één seconde op 'tijd omlaag', dan wordt het 036.)
- 3) Stel de mengsnelheid in. Druk op de knop 'snelheid omhoog' of 'snelheid omlaag'; het LCD-scherf geeft de snelheid weer. Druk kort op 'snelheid omhoog' en de snelheid neemt met 100 omwentelingen toe; druk kort op 'snelheid omlaag' en de snelheid neemt met 100 omwentelingen af. Als u de knop 'snelheid omhoog' of 'snelheid omlaag' lang ingedrukt houdt, neemt de snelheid snel toe of af. (Het instelbereik voor de snelheid ligt tussen 2.800 en 5.000 omwentelingen). (Bijvoorbeeld: 3200 staat voor 320 omwentelingen. Druk de knop 'snelheid verhogen' in voor 100 omwentelingen, dan wordt het 330; druk de knop 'snelheid verlagen' in voor 100 omwentelingen, dan wordt het 310.)
- 4) Open het masker, plaats de capsule in de klem en sluit het masker vervolgens. (Om de veiligheid te waarborgen, geeft het apparaat bij een fout een pieptoon in plaats van te werken terwijl het masker open is); voor dit ontwerp is met succes een nationaal octrooi aangevraagd, met nummer ZL 2005 2 0014942.1.
- 5) Druk op de Start/Stop-knop; het apparaat start. Ondertussen geeft het LCD-scherf de tijd weer, die dienovereenkomstig afloopt totdat de tijd om is, waarna een pieptoon klinkt en het apparaat automatisch stopt met werken.
- 6) Schakel het apparaat uit en haal de capsule eruit; het mengen is voltooid.

△ Let op

- ① Druk tijdens het gebruik op de knoppen en gebruik het masker op de juiste manier.
- ② De plaatsing van de amalgaamcapsule en de glasionomeercapsule wordt weergegeven in de bijgevoegde afbeeldingen.

VI. Dagelijkse inspectie en onderhoud

1. **Zet de schakelaar uit. Houd de behuizing en de klem schoon met een antibacteriële oppervlaktereiniger indien er verontreinigingen aanwezig zijn.**

△ Let op

- 1) De inspectie en het onderhoud moeten worden uitgevoerd nadat het apparaat volledig is afgekoeld.
- 2) Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

2. Veeg het stof van het oppervlak weg.

△ Let op

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

3. Onderhoudsinterval: het apparaat moet na één jaar normaal gebruik worden onderhouden, met name wat betreft de strakheid en stevigheid van de klemmen. Als deze los zitten of kapot zijn, vervang ze dan tijdig.

VII. Veelgestelde vragen

1) Het apparaat werkt helemaal niet: controleer of de zekering is doorgebrand; als dat het geval is, vervang deze dan door een geschikte patroonzekering: de zekering vervangen: gebruik een F2A $\Phi 5 \times 20$ -zekering, draai de schroeven op het zekeringblok los met een kruiskopschroevendraaier, plaats de patroonzekering en draai de schroeven weer vast.

2) Oplossing voor een defect masker: als u op de Start/Stop-knop drukt en het apparaat reageert niet, is het waarschijnlijk dat het Hall-gedeelte van het masker is losgeraakt. Oplossing: Druk in de uit-stand tegelijkertijd op de timer en de schakelaar aan de achterzijde; op het LCD-scherm verschijnt "O"/"U". Laat vervolgens de timer en de schakelaar los en druk op de Start/Stop-knop om te schakelen tussen "O" en "U". Zet daarna de schakelaar aan de achterzijde uit. Zet de schakelaar weer aan; terwijl deze op „O“ staat, opent u het masker; het apparaat stopt dan met werken. Terwijl deze op „U“ staat en het masker open is, kan het apparaat continu blijven werken. Deze oplossing is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen; stuur het apparaat vervolgens naar de onderhoudsafdeling voor medische apparatuur of naar de fabrikant.

3) Ongelijkmatige amalgaamcapsules en glasionomeercapsules:

- Controleer of de snelheid en de tijd correct zijn ingesteld.

① Als de amalgaamcapsule zo droog is dat deze in poedervorm is, is de snelheid te laag en de tijd te kort. Stel de snelheid en de tijd opnieuw in en voer de handeling opnieuw uit.

② Als de amalgaamcapsule te dun is, is de snelheid te hoog en de tijd te lang. Stel de snelheid en de tijd opnieuw in en probeer het nogmaals.

- Controleer of de interne eigenschappen van de materialen zijn verslechterd. Vervang de amalgaamcapsules en glasionomeercapsules door nieuwe en voer de bewerking opnieuw uit.

4) Problemen met de timer en dergelijke: Stuur het apparaat naar de onderhoudsafdeling voor medische apparatuur of naar de fabrikant. Het is verboden de behuizing te openen voor reparatie.

• Als de problemen niet volgens de bovenstaande suggesties kunnen worden opgelost, demonteer of repareer het apparaat dan niet zelf. Neem verplicht contact op met de distributeur om het te laten repareren door professionele technici.

VIII. Service na verkoop:

Drie garanties, 1 jaar garantie.

IX. Opslagomstandigheden:

Temperatuur: -10-40 °C, relatieve vochtigheid: ≤80%, geen corrosieve gassen, goed geventileerd.

X. Afbeeldingen en symbolen:



(II-B)

G5/G6-figuren en tekens:



(timer)



(start/stop)

G10/G8-cijfers en tekens:



Toerental



Timer



Start-/stopknop

XI. Paklijst:

Nee	Naam	aantal
1	Amalgamator	1
2	veren	2
3	Zekering 2 A Φ5×20	2
4	Gebruiksaanwijzing	1
5	Certificaat (onder het apparaat)	1

Bedieningsstappen G5, G6, G10 (metalen clip)




(1)




(2)



(3)

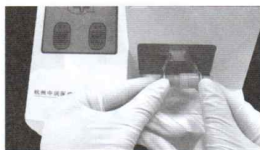


(4)

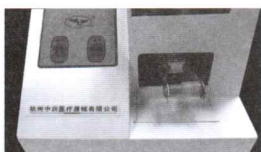


(5)



(1)

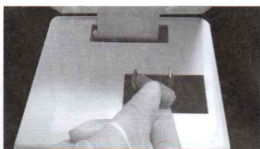


(2)

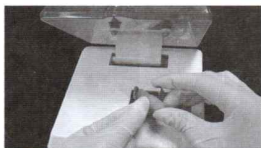

(3)



(4)

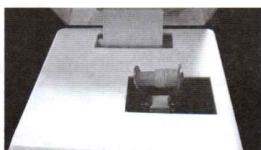

(5)